

安楽な呼吸姿勢を保つ

シムス位・側臥位兼用ピロー

POINT 1

シムス位では
上腕・胸部
腰部・下肢
を支持できる

POINT 5

次亜塩素酸消毒
対応生地を使用

POINT 2

側臥位では、背
中から腰、臀部
をしっかり支
えます。

POINT 4

自重シートにより
クッションが
ずれにくい

POINT 3

ファスナーで
中材（ビーズ）
を取り出せる

※仕様やデザインは予告なしに変更になる場合があります。

人工呼吸器時に

シムス位
(前傾側臥位)



体位ドレナージに

側臥位



誰もが楽しい食事を

KONAN MEDICAL LABORATORY

POINT 1 シムス位では上腕・胸部・腰部・下肢を支持できる 側臥位では背面から、腰部、臀部まで支持できる



シムス位・側臥位兼用ピローは長さが1400mmあり、シムス位姿勢に必要な上腕・胸部・腰部・下肢を支えることができます。



シムス位・側臥位兼用ピローは長さが1400mmあり、背面から、腰、臀部の曲面をビーズがしっかりと支えます。

POINT 2 ファスナーで中材（発泡ビーズ）を取り出せる



- ・クッション部分は発泡ビーズの中材 3 つから構成されています。
- ・チャックを開け、ゆっくりと発泡ビーズの中材を抜き取って下さい。
- ・発泡ビーズの中材を入れた後は、ビーズが偏らないようになじませて下さい。

POINT 3 自重シートにより、クッションがずれにくい



自重シート（幅300mm長さ1400mmの生地部分）に体の一部が乗ると体幹が動いても、クッション部分が自重により押さえつけられているため、クッション自体が動きにくくなります。

POINT 4 次亜塩素酸消毒対応生地を使用

- ・唾液、嘔吐、頭髪、薬剤などが生地に付着し、不衛生になった場合、洗濯と消毒ができます。シムス位・側臥位兼用ピローのカバー、中材（ビーズ）袋及び発泡ビーズは、0.1%次亜塩素酸消毒対応の生地・素材を使用しています。
- ・業務用洗濯機を使用する場合、洗濯・消毒・すすぎを行い低温で乾燥させてください。
- ・手洗いをする場合は、ぬるま湯で手洗いと消毒・すすぎを行う。洗濯ネットにいれ洗濯機で脱水をかけてから日

POINT 5 使用方法



自重シートをベッドの中央に置く。

シムス位調整



自重シートの半分ぐらいに体がかかるように、仰向けになる。



体をクッション側に引き寄せ、シムス姿勢を調整する。

側臥位調整



自重シートの半分ぐらいを体の下に入れておく。



身体の曲線にそってクッション部を沿わす。当て方により傾斜が変わります。

注意事項

- 本品は可燃性ですので、タバコなど火気の近くでの使用は十分にご注意ください。
- 針やカッターナイフなど、刃物や鋭利な物を本体に使用しないでください。

販売価格

シムス位ピロー 16,000 円（消費税・送料別途）

※製品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

シムス位ピロー仕様



サイズ(mm)	幅クッション部280/自重シート300×長さ1400×高さ150
材質	布帛(ポリエステル100%)、ニット(ポリエステル100%) ビーズクッション(中材:ポリスチレン、ポリエチレン重合体)
重量	約900g

シムス位・側臥位兼用ピロー取扱説明書

シムス位では、上腕・胸部・腰部・下肢を支持します。
側臥位では、背中から腰、臀部をしっかり支えます。



形状と各部の名称

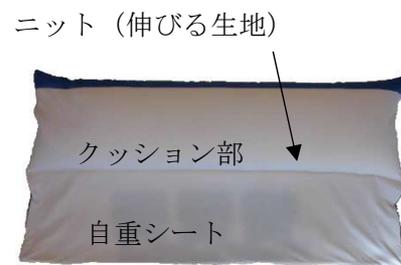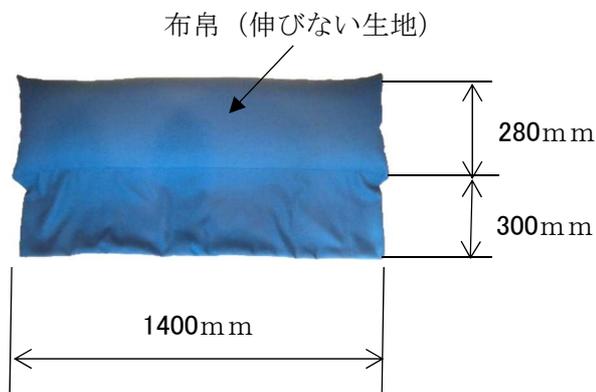

シムス位では、布帛を身体側に、自重シートを身体の下に敷いて使用



シムス位・側臥位兼用ピローは長さが1400mmあり、シムス位姿勢に必要な上腕・胸部・腰部・下肢を支えることができます。高さ調整も容易にできます。へたりにくく流動しにくい大粒ビーズを使用し、姿勢を崩れにくくしています。

調整方法



自重シートをベッドの中央に置く。



自重シートの半分ぐらいに体がかかるように、仰向けにする。



体をクッション側に引き寄せ、シムス姿勢を調整する。

微調整



クッション側面からビーズを押し、身体とクッションとの隙間を埋める。



クッション部を押しながら、クッション部を押しながら、ビーズを移動させると、高さが下がります。



タオルなどをクッションとマットレスの間に差し込むと高さが上がります。

側臥位では、布帛を身体側に、自重シートを身体の下に敷いて使用

シムス位・側臥位兼用ピローは長さが1400mmあり、背中から、腰、臀部をしっかりと支えることができます。へたりにくく流動しにくい大粒ビーズを使用し、姿勢を崩れにくくしています。

調整方法



自重シートをベッドの中央に置く。



自重シートの半分ぐらいを体の下に入れておく。



体をクッション側に引き寄せ、身体の曲線にそってクッション部を沿わす。クッションの当て方により、60～90度の傾斜を変えれます。

シムス位・側臥位兼用ピロー仕様

サイズ	外形 600×1400 クッション部幅280/自重シート 300×高さ150 長さ 1400 mm
材質	布帛（ポリエステル100%）、ニット（ポリエステル100%） ビーズクッション（ポリスチレン、ポリエチレン重合体）
重量	約1000g

お手入れ方法

- シムス位・側臥位兼用ピローは、0.1%次亜塩素酸消毒対応の生地・発泡ビーズを使用しています。
- 唾液、嘔吐、頭髮、薬剤などが生地に付着し、不衛生になった場合、洗濯と消毒ができます。
- カバーを開けて、クッション材を取り出す



- ・クッション部分は発泡ビーズの中材3つから構成されています。
- ・ファスナーを開け、ゆっくりと発泡ビーズの中材を抜き取って下さい。
- ・発泡ビーズの中材を入れた後は、ビーズが偏らないようになじませて下さい。

●洗濯上の注意

- ・カバーを洗濯する際は、ファスナーをしっかりと閉じてください。
- ・業務用洗濯機を使用する場合、洗濯・消毒・すすぎを行い低温で乾燥させてください。
- ・手洗いをする場合は、ぬるま湯で手洗いと消毒・すすぎを行う。洗濯ネットにいれ洗濯機で脱水をかけてから日陰干ししてください。



製造・販売 **誰もが楽しい食事を**

株式会社 甲南医療器研究所

〒653-0032 神戸市長田区苅藻通 2-7-6

TEL 078-651-3819 FAX 078-330-1132

e-mail : info@easyswallow.jp

<http://easyswallow.jp/>

営業時間（月～金）9時～18時

シムス位ピローの洗濯および消毒方法

1. シムス位ピローの構成

シムス位ピローは外袋と中材（発泡ビーズ）から構成されています。

洗濯、消毒する時は、外袋のファスナーを開け中材を3つ出してください。



発泡ビーズの耐熱が75度のため、外袋と中材の洗濯および消毒方法は異なります。

2. 材質

・シムス位ピロー

外袋 布帛：ポリエステル 100% ニット：ポリエステル 100%

中材 メッシュ：ポリエステル 100% 中材：ポリエチレン・ポリスチレン重合体

3. 洗濯方法

- ・外袋 洗濯用ネットに入れて業務用洗濯機で洗えます。
- ・中材 別々の洗濯用ネットに入れてください。
業務用洗濯機の場合は、低温で洗ってください。
手洗いの場合は、ぬるま湯で手洗いして下さい。

4. 消毒方法

- ・外袋 2通りの消毒方法があります。
 - ①熱水消毒可能：80°C10分間の熱水洗濯機が使用可能。
 - ②洗浄後、汚染程度により0.02~0.1%次亜塩素酸ナトリウム液に5~30分浸漬して消毒し、すすぎ後、乾燥。
- ・中材
 - ①業務用洗濯機の場合、低温で洗濯・消毒・すすぎを行い、低温乾燥で乾燥させてください。
 - ②洗浄後、汚染程度により0.02~0.1%次亜塩素酸ナトリウム液に5~30分浸漬して消毒し、すすぎ、脱水後日陰干ししてください。